



1. Die Flasche aus dem Halter herausnehmen.



2. Die Augenschale in Pfeilrichtung drehen, bis die Versiegelung bricht.



3. Den Kopf zurücklehnen und spülen.



4. Bei leichten mechanischen Schäden auch nur einfach nach vorne lehnen und spülen, wenn Ihre Kleidung nicht nass werden soll.



Wichtig!

Bei allen Verschmutzungen soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigem Strahl gespült werden. Die Augenspülflaschen während des Spülvorganges leicht drücken. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder- Verschmutzung einzuholen. Die Spülung sollte auch während des Transports zum Arzt fortgeführt werden.

Wirksame Augenspülung mit pH Neutral

pH Neutral ist ein wirksamer Phosphatpuffer (4,9%), der bei Säuren und alkalischen Substanzen neutralisierend wirkt. Im Gegensatz dazu wird bei der Verwendung von normalem Wasser oder Natriumchloridlösung (0,9%) nur ein Verdünnungs- und reiner Spüleffekt erreicht. Hierbei sind deshalb wesentlich größere Mengen und damit auch längere Spülzeiten erforderlich.

Im Rahmen einer Titrationsanalyse im Labor hat Plum durch einen in vitro Test den Neutralisierungseffekt von pH Neutral nachgewiesen und mit dem Effekt der 0,9% Natriumchloridlösung verglichen. Hieraus wird deutlich, dass pH Neutral den alkalischen und auch sauren pH Wertbereich wieder auf ein unschädliches Niveau einstellen kann. Die 0,9% Natriumchloridlösung verdünnt die Flüssigkeit, aber der pH Wert ändert sich nur unwesentlich.

Die Wirksamkeit von pH Neutral wird auch durch wissenschaftliche Studien bestätigt.

Empfohlene Anwendung von pH Neutral

pH Neutral ist als Erste Hilfe Maßnahme für die Notfallspülung mit einer Spüldauer von 2 Minuten bestimmt. Ziel bei der Spülung mit einer Flasche pH Neutral ist es, den pH Wert so schnell wie möglich wieder auf ein unbedenkliches Niveau einzustellen, wenn Säuren oder Alkali mit dem Auge oder der Haut in Kontakt kommen. Zur Fortsetzung der Spülung auf dem Weg zum Arzt wird der Einsatz der Plum Augenspüllösung mit 0,9% Natriumchloridlösung empfohlen. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung einzuholen.

Weitere Untersuchungen, die von externen Augenspezialisten durchgeführt worden sind, kommen zu dem Ergebnis, dass die empfohlene Spülzeit von 2 Minuten für das Auge unbedenklich ist.

DUO Augenspülung für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen

Bei einer Vielzahl von Augenunfällen sind beide Augen betroffen. Schmutz- und Schadstoffe können dabei innerhalb von wenigen Sekunden tiefer in das Augengewebe eindringen und weitergehende Schäden verursachen.

DUO Augenspülung für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen

Mit den neuen Plum Augenspülflaschen DUO wird jetzt ein größtmöglicher Sicherheitsstandard für die Erste Hilfe erreicht, denn Sie können gleichzeitig beide Augen mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl spülen ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren! Zusätzlich wird das Offenhalten der Augenlider durch den neu entwickelten Augenaufsatz unterstützt. Während des Spülvorgangs wird die Flüssigkeit von den Augen weggeleitet.



Artikel-Nr. BR 314 075 (4800)



Artikel-Nr. BR 315 075 (4801)

Augenspülung bei Fremdkörpern



Augenspülflasche mit 500 ml Natriumchloridlösung

Augenspülflasche mit 500 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe. Die Flasche ist zur Nachfüllung der Augenspülstationen und für den Einzeleinsatz geeignet. PZN-Nr. 4397402.

- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 5 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr. BR 314 005 (4604)



Augenspülflasche mit 1000 ml Natriumchloridlösung

Augenspülflasche mit 1000 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe. Die Flasche ist zur Nachfüllung der Augenspülstation Maxi und für den Einzeleinsatz geeignet. PZN-Nr. 3099111.

- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 10 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr. BR 314 025 (4707)



Augenspülflasche DUO mit steriler Natriumchloridlösung

Augenspülflasche DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen, mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Die Flaschen sind zur Nachfüllung der Augenspülstationen DUO und für den Einzeleinsatz geeignet.

- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr.	Ausführung
4861	Augenspülflasche DUO mit 500 ml Inhalt, Spülzeit ca. 2 Minuten, PZN 10249858
BR 314 075 (4800)	Augenspülflasche DUO mit 1000 ml Inhalt, Spülzeit ca. 5 Minuten, PZN 6134546



Augenspülflasche mit 200 ml Natriumchloridlösung

Handliche Augenspülflasche mit 200 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe. Für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe-Koffer und Aufbewahrung in der speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche. PZN-Nr. 4397388.

- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 2 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr. BR 314 010 (4691)



Zubehör:

Artikel-Nr. BR 314 011 (4692): Gürteltasche für 200 ml Augenspülflaschen



QuickRinse Mini

Kleine und praktische Verpackung mit 4 Augenspülampullen mit jeweils 20 ml 0,9 % steriler Natriumchloridlösung. Die Ampullen bieten schnelle, einfache und hygienische Hilfe bei kleineren Irritationen im Auge durch Staub, Schmutz o.ä.. Durch die handliche Taschengröße kann die Verpackung bequem mitgeführt werden und ist so bei Bedarf jederzeit schnell griffbereit.

Haltbarkeit: 3 Jahre
PZN-Nr. 11029509

Artikel-Nr. 4619



Augenspülstation mit einer Flasche 500 ml Natriumchloridlösung

Augenspülstation mit einer Flasche mit 500 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Mit Wandhalterung und beiliegendem Piktogramm. Besonders für eine jederzeit schnell verfügbare Augenspülung an kleineren Arbeitsplätzen geeignet. PZN-Nr. 4397425.

- Maße Piktogramm (H x B x T): 300 x 90 x 3 mm
- Maße Wandhalterung (H x B x T): 35 x 80 x 57 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 5 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr. BR 312 005 (4611)



DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen

Augenspülstation DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen

Augenspülstation DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen, mit einer Flasche mit 1000 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Mit Wandhalterung, beiliegendem Piktogramm und Spiegel. Besonders für eine jederzeit schnell verfügbare Augenspülung an kleineren Arbeitsplätzen geeignet. PZN-Nr. 6134575.

- Maße Piktogramm (H x B x T): 300 x 90 x 3 mm
- Maße Wandhalterung (H x B x T): 350 x 50 x 55 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 5 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr. BR 313 005 (4802)



Augenspülstation mit zwei Flaschen 500 ml Natriumchloridlösung

Augenspülstation mit zwei Flaschen mit 500 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Mit Wandhalterung und integriertem Piktogramm. Die Station ist zusätzlich mit einem Spiegel ausgestattet und ermöglicht eine besonders korrekte und schnelle Spülung an Arbeitsplätzen, wo eine längere Spülzeit erforderlich ist. PZN-Nr. 4397431.

- Maße Wandstation (H x B x T): 290 x 230 x 80 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 10 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr. BR 318 005 (4694)



Augenspülstation mit zwei Flaschen 500 ml Natriumchloridlösung, in Wandbox

Augenspülstation in staubgeschützter Wandbox. Mit zwei Flaschen mit 500 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%), Kennzeichnung Augenspülung und Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z.B. Werkstätten). Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen. PZN-Nr. 4397448.

- Maße Wandbox (H x B x T): 265 x 227 x 110 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 10 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr. BR 320 005 (4650)

Augenspülung bei Fremdkörpern



Augenspülstation MAXI mit zwei Flaschen 1000 ml Natriumchloridlösung

Augenspülstation mit zwei Flaschen mit 1000 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Mit zwei Wandhalterungen und beiliegendem Piktogramm. Die Station ist zusätzlich mit einem Spiegel ausgestattet und ermöglicht eine besonders korrekte und schnelle Spülung an Arbeitsplätzen, wo eine sehr lange Spülzeit erforderlich ist. PZN-Nr. 3128893

- Maße Wandstation (H x B x T): 350 x 265 x 55 mm
- Maße Piktogramm (H x B x T): 300 x 90 x 3 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 20 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr. BR 322 005 (4708)



Augenspülstation DUO mit zwei Flaschen 1000 ml Natriumchloridlösung, in Wandbox

Augenspülstation DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen, in staubgeschützter Wandbox. Mit zwei DUO Augenspülflaschen mit 1000 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper (Staub, Schmutz, Splitter etc.) in das Auge gelangen können. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial, Spiegel und Kennzeichnung Augenspülung.

PZN-Nr. 6585272.

- Maße Wandbox(H x B x T): 355 x 250 x 115 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 10 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr. BR 323 005 (4816)

DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen



Augenspültschrank mit zwei Flaschen – Stahlblechschrack mit Sichtfenster

Augenspülstation in staubdichtem Wandschrack mit Sichtfenster, Material Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Inklusive Piktogramm auf der Tür. Mit zwei Flaschen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z.B. Werkstätten). Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen.

- Maße Wandschrack (H x B x T): 355 x 265 x 100 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr.	Ausführung
BR 324 005	2x Augenspülflaschen mit 500 ml Inhalt, Spülzeit ca. 10 Minuten
BR 326 005	2x Augenspülflaschen mit 1000 ml Inhalt, Spülzeit ca. 20 Minuten



Augenspültschrank mit zwei Flaschen – Edelstahlschrack

Augenspülstation in staubdichtem Wandschrack, Material Edelstahl V4A. Inklusive Piktogramm auf der Tür. Mit zwei Flaschen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z.B. Werkstätten). Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen.

- Maße Wandschrack (H x B x T): 355 x 265 x 100 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr.	Ausführung
BR 324 095	2x Augenspülflaschen mit 500 ml Inhalt, Spülzeit ca. 10 Minuten
BR 326 095	2x Augenspülflaschen mit 1000 ml Inhalt, Spülzeit ca. 20 Minuten

Augenspülung bei Säuren und Laugen



Augenspülflasche pH Neutral

Handliche pH Neutral Augenspülflasche mit 200 ml steriler Phosphatpufferlösung (4,9%). Für die schnelle Neutralisation von Säuren und Laugen. Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe. Für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe-Koffer und Aufbewahrung in der speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche. PZN-Nr. 4397394.

- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 2 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr. BR 315 010 (4752)



Zubehör:

BR 314 011 (4692): Gürteltasche für 200 ml Augenspülflaschen



Notfallspülflasche mit 1000 ml Phosphatpufferlösung

Notfallspülflasche pH Neutral mit 1000 ml steriler Phosphatpufferlösung (4,9%), die selbst starke Säuren und Laugen auf der Haut schnell und effektiv neutralisiert. Ausgestattet mit einem speziellen Sprühkopf, der eine gleichmäßige Verteilung der Flüssigkeit über eine große Körperfläche gewährleistet. Kann auf dem Arbeitstisch abgestellt oder im Werkzeugkasten, LKW und Kundendienstwagen mitgeführt werden. Auch für die Nachfüllung der Notfallstation geeignet. PZN-Nr. 4397419.

- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 2 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr. BR 315 005 (4746)



Augenspülflasche pH Neutral DUO für die gleichzeitige Spülung beider Augen

Augenspülflasche pH Neutral DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen, mit 500 ml steriler Phosphatpufferlösung (4,9%). Für die schnelle Neutralisation von Säuren und Laugen. Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen. Auch für die Nachfüllung der Augen-Notfallstation DUO geeignet. PZN-Nr. 6134552.

- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 2 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr. BR 315 075 (4801)

DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen



Notfallstation mit einer Flasche 1000 ml pH Neutral

Notfallstation mit einer pH Neutral Notfallspülflasche mit 1000 ml steriler Phosphatpufferlösung (4,9%). Mit Wandhalterung und beiliegendem Piktogramm. Lässt sich an nahezu jedem gefährdeten Arbeitsplatz montieren und benötigt keinen Wasseranschluss. Sinnvolle Ergänzung zu fest installierten Notduschen. PZN-Nr. 4397454.

- Maße Piktogramm (H x B x T): 300 x 90 x 3 mm
- Maße Wandstation (H x B x T): 350 x 175 x 55 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 2 Minuten

Artikel-Nr. BR 317 005 (4741)



Augen-Notfallstation

Augen-Notfallstation mit einer pH Neutral Augenspülflasche mit 200 ml steriler Phosphatpufferlösung (4,9%) und einer Augenspülflasche mit 500 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Mit Wandhalterung, integriertem Piktogramm und Spiegel. Lieferung inklusive Augen-Notfallplan. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren, Laugen und Fremdkörper in das Auge gelangen können. PZN-Nr. 0622871.

- Maße Wandstation (H x B x T): 290 x 230 x 80 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 7 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr. 318 045 (4770)



DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen

Augen-Notfallstation DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen

Augen-Notfallstation DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen. Mit einer pH Neutral DUO Augenspülflasche mit 500 ml steriler Phosphatpufferlösung (4,9%) und einer DUO Augenspülflasche mit 1000 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Mit Wandhalterung, beiliegendem Piktogramm und Spiegel. Lieferung inklusive Augen-Notfallplan. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren, Laugen und Fremdkörper in das Auge gelangen können. PZN-Nr. 6134581.

- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 7 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr. 319 045 (4803)



Augen-Notfallstation in Wandbox

Augen-Notfallstation in einer staubgeschützten Wandbox mit einer pH Neutral Augenspülflasche mit 200 ml steriler Phosphatpufferlösung (4,9%) und einer Augenspülflasche mit 500 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Mit Befestigungsmaterial, Spiegel und Kennzeichnung Augenspülung. Lieferung inklusive Augen-Notfallplan. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren, Laugen und Fremdkörper in das Auge gelangen können. PZN-Nr. 0622865.

- Maße Wandbox (H x B x T): 265 x 227 x 110 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 7 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr. BR 320 045 (4789)



DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen

Augen-Notfallstation DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen, in Wandbox

Augen-Notfallstation DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen in einer staubgeschützten Wandbox. Mit einer pH Neutral DUO Augenspülflasche mit 500 ml steriler Phosphatpufferlösung (4,9%) und einer DUO Augenspülflasche mit 1000 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Mit Befestigungsmaterial, Spiegel und Kennzeichnung Augenspülung. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren, Laugen und Fremdkörper in das Auge gelangen können. PZN-Nr. 6585289.

- Maße Wandbox (H x B x T): 355 x 250 x 115 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 7 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr. BR 323 045 (4810)


Augen-Notfallstation in Wandschrank – Stahlblechschrank mit Sichtfenster

Augen-Notfallstation in einem staubdichten Wandschrank mit Sichtfenster, Material Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Inklusive Piktogramm auf der Tür. Mit einer pH Neutral Augenspülflasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9%) und einer Augenspülflasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren, Laugen und Fremdkörper in das Auge gelangen können.

- Maße Wandschrank (H x B x T): 355 x 265 x 100 mm

Artikel-Nr.	Ausführung
BR 324 045	1x pH Neutral Augenspülflasche 200 ml, 1x Augenspülflasche 500 ml Natriumchloridlösung, Spülzeit ca. 7 Minuten
BR 326 045	1x pH Neutral Notfallspülflasche 1000 ml, 1x Augenspülflasche 1000 ml Natriumchloridlösung, Spülzeit ca. 12 Minuten


Augen-Notfallstation in Wandschrank – Edelstahlschrank

Augen-Notfallstation in einem staubdichten Wandschrank, Material Edelstahl V4A. Inklusive Piktogramm auf der Tür. Mit einer pH Neutral Augenspülflasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9%) und einer Augenspülflasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren, Laugen und Fremdkörper in das Auge gelangen können.

- Maße Wandschrank (H x B x T): 355 x 265 x 100 mm

Artikel-Nr.	Ausführung
BR 324 495	1x pH Neutral Augenspülflasche 200 ml, 1x Augenspülflasche 500 ml Natriumchloridlösung, Spülzeit ca. 7 Minuten
BR 326 495	1x pH Neutral Notfallspülflasche 1000 ml, 1x Augenspülflasche 1000 ml Natriumchloridlösung, Spülzeit ca. 12 Minuten


Augenspülschrank leer

Augenspülschrank leer, staubdichter Wandschrank mit Sichtfenster aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Für die Bestückung mit den üblichen Augenspülflaschen geeignet. Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen.

- Maße Wandschrank (H x B x T): 355 x 265 x 100 mm

Artikel-Nr. BR 325 005


Frostsicherer Augenspülschrank leer

Beheizter Augenspülschrank leer, staubdichter Wandschrank mit Sichtfenster aus Edelstahl. Beheizung über selbstregelndes Begleitheizband. Inklusive Piktogramm auf der Tür. Für die Bestückung mit den üblichen Augenspülflaschen geeignet. EX-geschützte Ausführung für EX-Zone 1 & 2.

- Maße Wandschrank (H x B x T): 400 x 300 x 200 mm
- Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz
- Leistung: 100 W
- Schutzart: IP 66

Artikel-Nr. BR 327 795